

常時製品を更新していますので、ここの画像と異なることがありますが、基本的な使用方法は同じです。



GLOBAL *phantom*



フィルムを中心に挟み、純水、又は精製水を入れ、任意の角度で照射し、照射野形状と、位置、及び相対線量を測定する。




位置決め後、位置決めツールを取り外して照射する。




水平5度、角度5度を調整する位置決めツール。



下側の半球、水平と垂直横方向に5度の基準線を引いてあり、水抜き穴（イオンチャンバを挿入可能）付き。

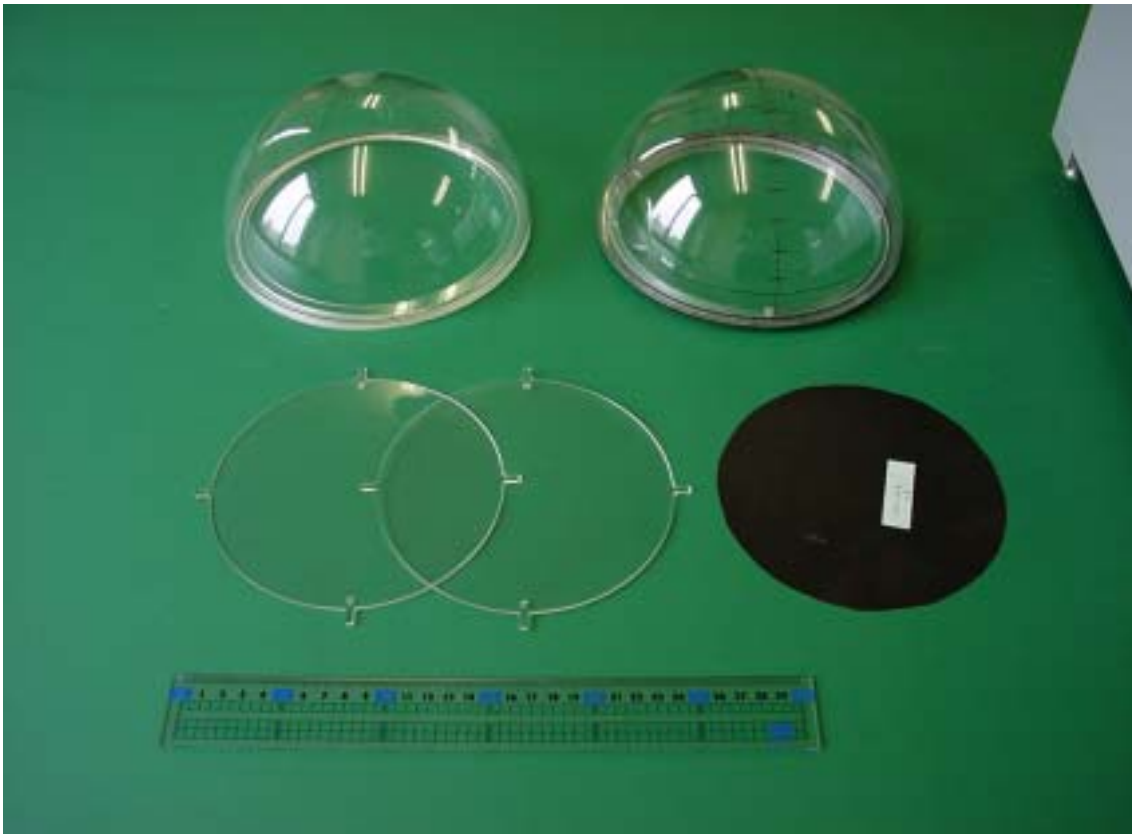

ガフクロミックフィルムをプレートに挟む

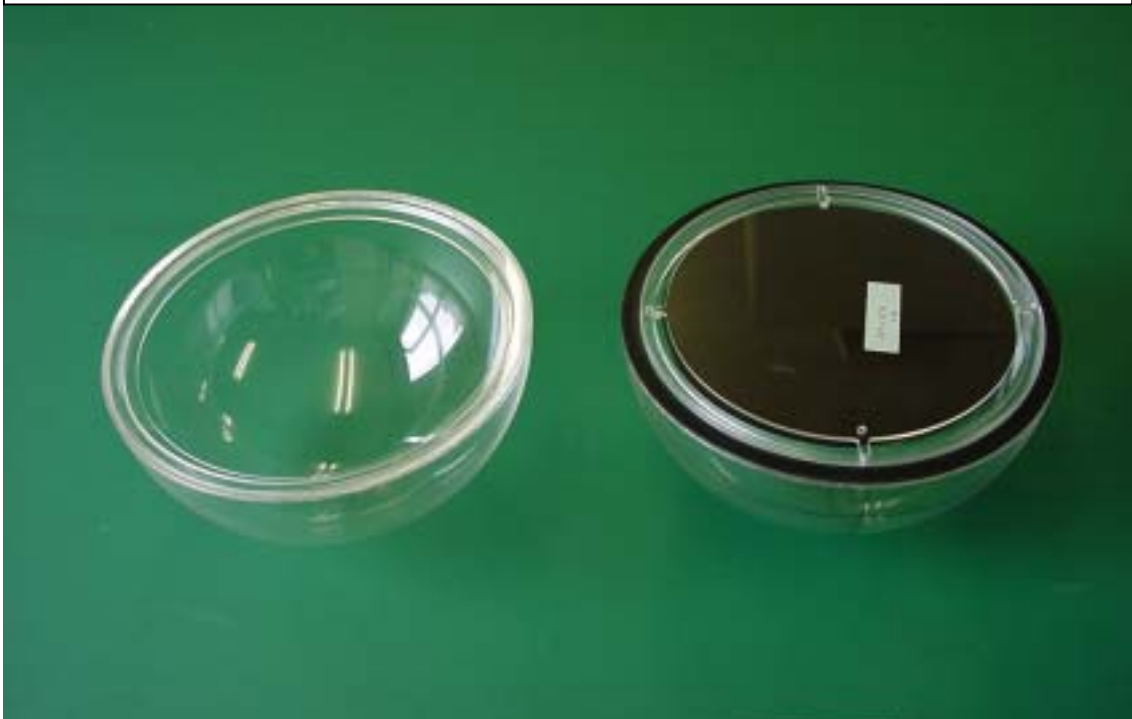

フィルムを挟んだプレートを球体に設定。

フィルム・スキャナー・測定方法



GLOBAL *phantom* (グローバル・ファントム) で測定したデータを
フィルム・スキャナ (オプション) で取り込み、専用ソフトで、
照射野形状、位置、及び相対線量を測定する。



Engineering & Consulting
For the Interfaces

輸入・販売 ハンドシェイク株式会社

〒222-0002

神奈川県横浜市港北区師岡町279-34

電話：045-540-8815 FAX：045-540-8816

<http://www.handshake.co.jp/>

email: email@handshake.co.jp